



Synchroniser votre Scanner signifie :

ENVOYER LES DONNÉES DES SCANS QUE VOUS AVEZ EFFECTUÉS
DE VOTRE SCANNER VERS LE SERVEUR MONDIAL DE NU SKIN.

AVANTAGES :

- ✓ Sur vos rapports Scanner, vous verrez un aperçu de l'ensemble de votre activité Scanner.
- ✓ La connexion se fait entre les scans liés à des abonnements ADR.
- ✓ Nu Skin peut vous verser vos bonus Scanner.



S3


PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Synchronisez votre Scanner avec la version 2.0 de l'application

- ✓ après chacune de vos sessions de scan,
- ✓ au moins une fois tous les 14 jours et
- ✓ au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Si votre Scanner n'a pas été synchronisé dans les 14 jours, il se désactive automatiquement. Vous ne pourrez effectuer un nouveau scan qu'après avoir synchronisé votre appareil.

Consultez l'onglet « Archives » pour voir combien de jours il vous reste avant la prochaine synchronisation :

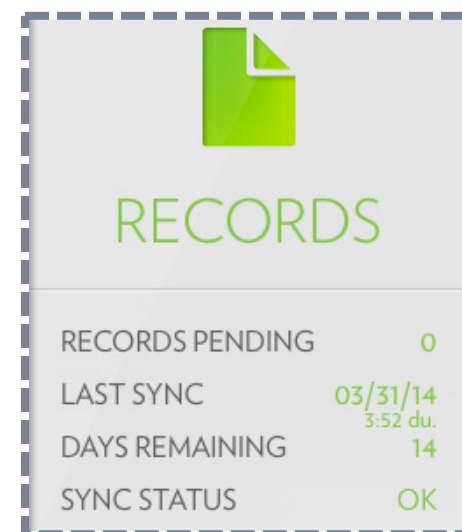

	
RECORDS	
RECORDS PENDING	0
LAST SYNC	03/31/14 3:52 du.
DAYS REMAINING	14
SYNC STATUS	OK

Synchronisez votre Scanner avec la version 2.0 de l'application

Votre Scanner est automatiquement synchronisé tant que votre iPad* est connecté à un réseau Wi-Fi.

- Tous les scans **synchronisés** apparaissent en tant que :



- Tous les scans **non synchronisés** apparaissent en tant que :



- Pour synchroniser les scans, appuyez sur le bouton :





Synchronisez votre Scanner avec la version 3.0 de l'application

Votre scanner est automatiquement synchronisé tant que votre appareil* est connecté à un réseau Wi-Fi.

Si vos scans n'ont pas été synchronisés, il vous suffit de reconnecter votre appareil à un réseau Wi-Fi (au plus tard le dernier jour ouvrable du mois) pour que tous les scans soient synchronisés automatiquement.

**La version 3.0 de l'application Scanner S3 a été développée pour OS 12 ou version ultérieure, sur iPhone et iPad.*

S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

